

ANDADORES DE APOIO ANTERIOR MODELOS Y1S, Y2S, E Y3S

(1/11/2012)

Este é o Manual do Usuário para os Andadores de Apoio Anterior Modelos Y1S, Y2S e Y3S. Todas as pessoas que montam, ajustam ou utilizam o andador, devem, primeiramente, ler todas as instruções contidas neste manual. Leia este manual cuidadosamente antes de utilizar o produto e guarde-o para referências futuras.

USO

Estes andadores foram projetados para usuários que suportam o peso sobre as pernas e dar passos, mas que não tem força suficiente nos membros superiores para utilizar os andadores convencionais. Esses andadores foram projetados, especificamente para usuários com espasticidade grave, atetose, ou ataxia.

RODAS

Estes andadores são equipados com quatro rodas. As rodas dianteiras podem ser travadas em uma única direção ou podem girar livremente em todas as direções. As rodas traseiras tem trava de Movimento reverse, não permitindo que o andador volte para trás.

IDENTIFICAÇÃO DO ANDADOR E LIMITES DE TAMANHO E PESO

O número do andador pode ser encontrado na etiqueta amarela/laranja localizada na "perna" do andador.

O quadro a seguir mostra os limites de tamanho e peso dos andadores, como segue:

A = Ajuste de altura, em inches, do chão ao topo da almofada do peito/tronco. Esta medida deve corresponder à altura do chão ao mamilo do usuário.

B = Ajuste de altura, em centímetros.

C = Limite máximo de peso, em libras.

D = Limite máximo de peso, em **quilos**.

MODELO	A (ins.)	B (cms.)	C (lbs.)	D (kgs.)
Y1S	18-28	46-71	85	39
Y2S	22 - 36	56 - 91	85	39
Y3S	30 - 47	76 - 119	130	60

ABRIR

Para abrir o andador, puxe as pernas dianteiras e traseiras em direção oposta até o pino de segurança de cada perna travar.

FECHAR

Para fechar o andador, aperte o pino de segurança, e empurre as pernas traseiras em direção às dianteiras. Inclinar o andador para frente pode ser útil neste momento.

INSTALAÇÃO DAS 'PERNAS'

Para instalar:

1. As pernas dianteiras tem as rodas maiores. Coloque a perna dianteira com etiqueta laranja do lado esquerdo da estrutura. Coloque a outra perna no lado direito da estrutura.

2. As pernas traseiras tem as rodas menores. Coloque a perna com etiqueta laranja na parte traseira da estrutura, do lado esquerdo. Coloque a outra perna na parte traseira da estrutura do lado direito.

AJUSTE DA ALTURA

Para ajustar a altura final do andador, aperte o pino de segurança (uma perna de cada vez) e deslize a extensão da perna pra cima ou para baixo, conforme a necessidade.

Após instalar as pernas ou ajustar a altura do andador, sempre faça a seguinte checagem:

1. As quatro pernas devem estar ajustadas na mesma altura.

2. Os pinos devem estar totalmente sobressalentes aos furos.

3. As rodas devem estar posicionadas na parte externa do andador.
4. O mecanismo de trava das rodas traseiras deve evitar que o andador role para trás.

INSTALAÇÃO DAS ALMOFADAS LATERAIS

Se as almofadas laterais estiverem embaladas separadamente, fixe-as (lado do metal) à frente da almofada do peito como segue:

1. Identifique e remova os quatro parafusos F **do fundo, da parte traseira para da almofada do peito. Identify and remove four screws F from the bottom, back edge of the chest cushion.**
2. Posicione cada almofada de lado, como mostrado, de modo que o suporte de metal envolva a parte de trás da almofada do peito.
3. Alinhe a ranhura do suporte de metal com os dois buracos de onde foram retirados os parafusos F.
4. Coloque a arruela sob a cabeça de cada parafuso F, e aperte todos os parafusos.

AJUSTE DA ALTURA DAS ALMOFADAS

Ajuste a altura da almofada de maneira que o topo da almofada esteja posicionado na altura do mamilo ou no meio do tronco. Se a almofada estiver muito alta, pode causar flexão do tronco, se estiver muito baixa, pode causar flexão do quadril.

Para ajustar a altura da almofada do peito sem alterar a altura do andador:

1. Remova os **botões/parafusos** C (um de cada lado) além das anilhas e porcas correspondentes.
2. Reposicione a almofada para cima ou para baixo conforme a necessidade.
3. Reinstale os parafusos, arruelas e porcas. Certifique-se de que estão corretamente posicionados e aperte-os.

AJUSTE DO ÂNGULO DA ALMOFADA

A almofada do peito foi projetada para dar suporte e alinhar o tronco numa posição ligeiramente inclinada para frente, o que pode facilitar a troca de passos.

Para ajustar o ângulo na posição inclinada para frente:

1. Retire as porcas D (uma de cada lado) e os parafusos correspondentes.
2. Reposicione o ângulo da almofada conforme a necessidade.
3. Reinstale os parafusos, arruelas e porcas.
4. Aperte bem as porcas.
5. **Somente para os modelos Y1S e Y3S** (não para o modelo Y2S): Remova as porcas E (uma de cada lado) e os parafusos correspondentes.
6. Reposicione o ângulo da almofada conforme a necessidade.
7. Reinstale os parafusos, arruelas e porcas.
8. Aperte bem as porcas.

AJUSTE DE LARGURA DA ALMOFADA

Para ajustar a largura entre as almofadas laterais:

1. Identifique o suporte de metal que prende cada almofada lateral.
2. **Follow each bracket around to the front (metal side) of the chest cushion. Then identify the two screws F that hold each bracket in place.**
3. Solte os parafusos.
4. Ajuste a largura entre as almofadas conforme a necessidade.
5. Aperte bem os quatro parafusos (dois em cada suporte de metal).

AJUSTE DAS MANOPLAS

Ajuste a manopla para posicionar corretamente os ombros e braços do usuário. Para isso:

1. Remova os botões G (um de cada lado) e as anilhas e porcas correspondentes.
2. Altere a posição da manopla para frente ou para trás, conforme a necessidade.
3. Para um pequeno aumento/redução da altura da manopla, fixe-as no topo do tubo em que é montada.
4. Reinstale os parafusos, arruelas e porcas. Certifique-se de que as arruelas de pressão estão devidamente posicionadas sob os botões e aperte os mesmos.

AJUSTE DAS RODAS TRASEIRAS

Ajuste o alinhamento e nivelamento das rodas traseiras como segue:

1. Se a cabeça do parafuso, localizado na parte exterior da roda, estiver coberta, remova a capa. Para fazer isso,

insira a ponta de uma chave de fenda logo abaixo da tampa de plástico e com cuidado levante-a. Desta forma, a cabeça do parafuso estará visível.

2. Segure a cabeça do parafuso localizado na parte externa para que ela não gire.

3. Solte a porca que está localizada no lado oposto da perna.

4. Ajuste o alinhamento conforme desejado.

5. Mova a roda para cima ou para baixo para nivelar o andador.

6. Segure a cabeça do parafuso localizado na parte externa para que ela não gire.

7. Identifique a porca localizada no lado oposto. Aperte firmemente a porca em direção ao tubo da perna.

BLOQUEAR E DESBLOQUEAR AS RODAS GIRATÓRIAS

Para permitir que as rodas dianteiras girem:

1. Identifique a trava giratória localizada na borda interna de cada roda dianteira.

2. Gire cada trava giratória ao redor e para baixo até que fique apoiada ao eixo do parafuso.

Para evitar que as rodas girem:

1. Posicione a roda para frente.

2. Gire cada trava giratória ao redor e para cima até encaixar completamente na ranhura que se encontra na placa superior da roda.

AJUSTE DO ALINHAMENTO DAS RODAS GIRATÓRIAS

Para ajustar o alinhamento das rodas giratórias:

1. Bloqueie os rodízios giratórios na posição para frente (conforme descrito acima).

2. Use uma chave de 1/2" para afrouxar o menor parafuso que se encontra na placa de cima de cada roda da frente.

3. Posicione o rodízio na direção desejada.

4. Aperte bem o parafuso.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Inspeção o andador regularmente. Aperte as porcas e parafusos quando necessário.

Se o produto precisar de assistência técnica ou peças de reposição, contate a Kaye Products, Inc. ou o Distribuidor de quem você comprou o produto.

Se for encontrado um problema que possa impactar no funcionamento do andador, cesse o uso imediatamente e contate seu Distribuidor/Kaye Products, Inc.

As rodas e pontas de apoio sofrerão desgaste natural e devem ser substituídos quando necessário.

A trava da roda traseira sofrerá desgaste e deverá ser substituída quando necessário para manter sua função de bloqueio da roda em um sentido único.

Se o seu andador tiver rodas traseiras silenciosas de sentido único, evite entrar em contato com areia, sal e água salgada. Use água e, se necessário, sabão/detergente para limpar o andador. Evite qualquer movimento brusco indevido enquanto utilizar, guardar ou transportar o andador.

GARANTIA LIMITADA

Se algum item apresentar defeito dentro de dois anos após a data de compra, nós forneceremos peças de reposição para que o defeito seja corrigido/eliminado. O desgaste dos itens relacionados em CUIDADOS E MANUTENÇÃO não são cobertos pela garantia.

A Kaye Products, Inc. não fornece nenhuma outra garantia, expressa ou implícita, e não garante que o produto seja adequado para propósitos específicos. O comprador, proprietário e usuário assumem todos os riscos de danos pessoais atrelados ao uso do produto.

CUIDADOS/PRECAUÇÕES

1. Não deve ser utilizado por idosos.

2. Cada vez que abrir o andador, certifique-se que os pinos de ajuste de altura estão completamente sobressalentes aos orifícios.

3. Não utilize o andador com peças quebradas ou danificadas.

4. Não utilize o andador em escadas, encostas íngremes ou rampas.

5. Não exceda os limites de peso e altura especificados.

6. Não faça alterações no produto ou utilize de formas diferentes das descritas neste manual.

7. Nunca deixe a criança sem supervisão.

8. Sempre disponha de supervisão qualificada.

DÚVIDAS?

Se você tiver qualquer dúvida, por favor entre em contato com seu Distribuidor/ Kaye Products, Inc.

