





INSTRUÇÕES DE USO

HeadpodGo é a resposta para aquelas situações em que não temos uma estrutura para adaptar Headpod. Pode-se utilizar tanto em pé como sentado isto é, em qualquer situação.

COLOCAÇÃO

- O headpodGo é colocado igual a uma mochila.
- A base deverá estar ajustada corretamente na região lombar. Cintas ajustáveis na cintura.
- Ajustar a alça traseira para manter posicionado.
- Colocar as placas metálicas necessárias para atingir a altura da nuca. Ajustar as cintas almofadas na altura dos ombros.
- As placas metálicas deverão ser encaixadas nas costas (posteriormente) entre as cintas almofadas para os ombros.
- Colocar a placa metálica em forma de S
- Caso necessário colocaremos a placa em S virada para fora ou dentro
- O braço de suspensão deve passar acima da cabeça, no eixo de rotação.

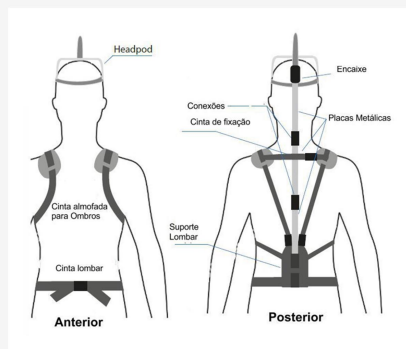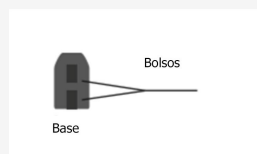

Importado e distribuído por: MAIS MOVIMENTO COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA REABILITAÇÃO LTDA. CNPJ 58.895.681/0001-83. Rua Ernesto Bristotti Nº 41 - Jardim Myriam - Campinas/SP. CEP: 13.098-408. AFE ANVISA nº 8.11.374-2. Resp. Técnico: Emmanuel Dias de Sousa Lopes CREFITO/SP 188523-F. Registro ANVISA nº 81137420006. Serviço de atendimento do consumidor SAC: (19) 3304-2500 / sac@maismovimento.com.br.

versão 2 deste manual do usuário.