

Importado e distribuído por: MAIS MOVIMENTO COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA REABILITAÇÃO LTDA. CNPJ 58.895.681/0001-83. Rua Ernesto Bristotti N° 41 - Jardim Myriam - Campinas/SP. CEP: 13.098-408. AFE ANVISA n° 8.11.374-2. Resp. Técnico: Emmanuel Dias de Sousa Lopes CREFITO/SP 188523-F. Registro ANVISA n° 81137420002. Serviço de atendimento do consumido SAC: (19) 3304-2500 / sac@maismovimento.com.br.

## **CADEIRA KINDER KAYE**

(efetivo 15/10/2002)

Estas são as instruções para usuários da Cadeira Kinder Kaye. Todas as pessoas que montam ou ajustam o equipamento devem ler primeiramente todas estas instruções. Por favor, manter estas instruções para futuras consultas.

### USO

As cadeiras Kinder Kaye são projetadas para crianças que necessitam de profundidade ajustável de assento e angulação do encosto com intuito de manter seu quadril, tronco e pélvis alinhados. Dessa forma, isso ajudará a criança a estabelecer uma postura sentada apropriada.

### TAMANHOS E MODELOS

A K1 vem com extensão curta de perna e uma bandeja removível. Com a bandeja, a K1 é apropriada como uma escrivaninha independente e cadeira.

A K2 vem com extensão longa de perna e assim, pode ser usada como uma mesa de altura padrão.

A K2+T é a K2 com um acessório, bandeja removível.

### IDENTIFICAÇÃO DA CADEIRA KINDER, TAMANHO E LIMITE DE PESOS

O número do modelo está localizado na etiqueta de aviso.

Todas as cadeiras Kinder são apropriadas para crianças de 1 a 7 anos de idade, com até 122 centímetros de altura, ou 27 quilos de peso.

### CONTEÚDO DA CAIXA

A caixa da K1 inclui a cadeira e a bandeja.

A caixa da K2 inclui a cadeira e a extensão das 4 pernas.

A caixa da K2+T contém a cadeira, a bandeja e a extensão das 4 pernas.

### INSTALAÇÃO DA K2, K2+T COM EXTENSÃO PERNAS

Montar a extensão das pernas do lado de fora da parte superior da perna como segue:

1. Remova os botões pretos e arruelas das extensões.
2. Instalar cada extensão do modo que lado reto da extensão esteja para frente do interior e o lado inclinado da extensão se alarga para fora.
3. Os múltiplos orifícios na parte superior da perna permitem ajustes diferentes de altura. Juntar cada extensão de forma que os parafusos se projetem através de dois desses orifícios.
4. Ajustar todas as 4 extensões na mesma altura.
5. Reinstalar e apertar firmemente as arruelas e botões.

### INSTALAÇÃO DO ENCOSTO E AJUSTE DE PROFUNDIDADE DO ASSENTO

Ajustar a profundidade do assento para que os glúteos e 3/4 das coxas da criança estejam posicionadas no assento. Quando a profundidade estiver propriamente ajustada, haverá um espaço de 2,54 cm de espaço entre a parte

frontal do assento e a parte traseira das pernas inferiores da criança.

O encosto deve ser encaixado com a face para baixo contra o assento e preso junto com o cinto de quadril. Soltar o cinto para remover o encosto.

Instalação e ajuste do encosto como segue:

1. O suporte de metal que está preso à parte traseira desliza sobre o orifício localizado sob a parte traseira do assento.

2. Há um parafuso curvado com um botão preto debaixo do encosto do assento. Soltá-lo para permitir que o suporte de metal possa deslizar pelo orifício.

3. Posicionar o assento na profundidade desejável.

4. Apertar firmemente o parafuso curvado.

#### INSTALAÇÃO E AJUSTE DA BANDEJA

Instalação e ajuste da bandeja (caso haja) como segue:

1. Posicionar a bandeja para que a borda curvada esteja adequada e confortável ao redor da criança e as bordas estejam apontadas para cima.

2. Na parte inferior da bandeja, há duas hastes de metal. Puxe-os para fora e deslize a bandeja sobre a cadeira de modo que os blocos de madeira se enganchem sob os apoios de braços.

3. Move the tray in or out as needed.

4. Sob cada apoio de braço, há um suporte de metal com uma série de orifícios. Soltar as hastes de metal e certificar que a ponta encaixou num destes orifícios.

5. Puxar a bandeja para garantir que ela esteja travada na posição.

#### AJUSTE DAS PERNAS DA CADEIRA

Ajuste no comprimento das pernas e eliminação de diferenças como se segue:

1. Remover os dois botões com as arruelas na parte inferior de cada perna.

2. Reposicionar a extensão das pernas.

3. Reinstalar as arruelas e botões, e apertar firmemente.

4. Caso haja alguma diferença nas pernas da cadeira, coloque-a numa superfície nivelada, soltar os botões como descrito acima, trocar as extensões das pernas como necessário e re-apertar firmemente os botões.

#### AJUSTE ANGULO DO ASSENTO-ENCOSTO

Para posicionar a criança numa posição mais vertical, ajustar o ângulo do encosto para uma posição mais vertical.

Ajustar o ângulo do assento como segue:

1. Localizar os dois botões pretos em cada lado detrás do encosto do assento.

2. Para regular o encosto mais vertical, soltar a parte superior do botão e apertar a parte inferior dele.

3. Para regular o encosto mais horizontal, soltar a parte inferior do botão e apertar a parte superior dele.

4. Após os ajustes, apertar firmemente os botões.

#### AJUSTE DE ALTURA DO DESCANSO DE PÉS

O Descanso de pés pode ser ajustado para que os joelhos posicionem dobrados com um ângulo de 90°.

Ajuste a altura do Descanso de pés como segue:

1. Remover os dois botões pretos e arruelas que estão localizados atrás do descanso de pés.

2. Reposicionar o descanso de pés.

3. Re-instalar e apertar firmemente as arruelas e os botões.

#### USO E AJUSTE DO CINTO DE QUADRIL

O cinto de quadril deve posicionar a criança com segurança na cadeira e segurar a pélvis na posição mais adequada. O cinto deve estar posicionado logo acima da articulação

do quadril e abaixo da cintura da criança.

Uso e ajuste do cinto como segue:

1. Para soltar a fivela, pressionar simultaneamente as abas nas bordas superior e inferior da fivela.
2. Para prender a fivela, inserir a parte superior na inferior até que as duas se encaixem com um click. Após prender a fivela, sempre puxar o cinto para assegurar que ele esteja preso corretamente.
3. Para ajustar o comprimento do cinto, soltar os dois parafusos do cinto acoplados no lado inferior do assento, reposicionar os parafusos numa posição diferente dos orifícios do cinto e re-instalar os parafusos firmemente.
4. Para apertar ou soltar a fivela, alongar ou encurtar o cinto, puxando a ponta do cinto através da fivela. Não remova a ponta final do cinto do fecho.

#### REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO ABDUTOR

O abdutor auxilia o posicionamento das extremidades dos membros inferiores. Ele pode ajudar a manter os joelhos do usuário separados e evitar a rotação das coxas.

O abdutor é projetado para que possa ser instalado após o ingresso da criança na cadeira. Isso faz com que seja mais fácil a subida ou posicionamento da criança na cadeira.

O abdutor não foi projetado para restrição, mas sim, ajudar no posicionamento. Usar o cinto de quadril para prender a criança na cadeira.

Remoção e instalação do abdutor como segue:

1. Puxar para fora a haste de metal que está localizada atrás da perna frontal direita (estando de frente para a cadeira).
2. Puxar o abdutor para fora.
3. Para instalar o abdutor, inserir o encaixe do abdutor no orifício embaixo do assento, puxar para frente a haste curvada, empurrar o abdutor para

trás totalmente, soltar a haste, e puxar o abdutor para frente para garantir que ele esteja travado na posição.

#### ACESSÓRIOS

A extensão do descanso de pés KCFRE se encaixa em todas as cadeiras Kinder. Ele abaixa o descanso de pés cerca de 18 centímetros.

A base com rodas K1CB serve na cadeira K1. A base K2CB serve na cadeira K2 e K2+T. A base com rodas não altera a altura das cadeiras.

O estabilizador pélvico-femoral KFS encaixa em todas as cadeiras Kinder. Ele fornece estabilidade adicional para as pernas e pélvis do usuário.

Os acessórios possuem suas instruções próprias de uso.

Por favor, entrar em contato com a Kaye Products, Inc. ou nosso distribuidor pelos nossos catálogos para maiores detalhes.

#### MANUTENÇÃO E CUIDADOS

Inspecionar a cadeira regularmente. Apertar as peças se necessário.

Caso a cadeira necessite de manutenção ou reparo, contate a Kaye Products, Inc. ou seu distribuidor exclusivo de onde comprou sua unidade.

Caso algum problema seja observado que impacte o funcionamento da cadeira, imediatamente parar o uso e contactar a Kaye Products, Inc. ou seu revendedor exclusivo.

Não expor a cadeira à chuva ou submergi-la na água.

Usar um pano levemente úmido para limpar a cadeira mas, enxugar a umidade após a limpeza nas partes de madeira.

Evitar qualquer sobrecarga na cadeira durante o uso, armazenamento e/ou transporte

#### GARANTIA LIMITADA

Caso algum item apresente defeito dentre 2 anos após a compra original, nós forneceremos reposição para correção das peças defeituosas. Desgaste natural de uso e rasgo não são cobertos pela garantia.

Kaye Products, Inc. não oferece nenhuma outra garantia, expressa ou implícita, e não garante que o produto seja adequado para um propósito específico. O comprador, proprietário e usuário assumem todos os riscos pessoais e materiais pelo uso do equipamento.

#### CUIDADOS

1. Não ajustar a cadeira enquanto estiver sendo utilizada.
2. Antes do uso, assegurar que todos os componentes estejam devidamente firmes.
3. Não usar a cadeira caso tenha alguma peça quebrada ou ausente.
4. Não exceder limites de tamanho ou peso.
5. Não modificar a Unidade ou uso de nenhuma forma descrita neste manual de instrução.
6. Não deixar o usuário sem supervisão.
7. Utilizar uma supervisão qualificada.
8. Não ficar em pé sobre ou dentro da cadeira.
9. Sempre usar o cinto de segurança.

#### DÚVIDAS?

Caso tenha alguma dúvida, comentário ou solicitação, por favor contate a Kaye Products, Inc. ou seu distribuidor.

