

KAYE PRODUCTS, INC.
535 DIMMOCKS MILL ROAD
HILLSBOROUGH, N.C. 27278
919-732-6444**FAX 800-685-5293

C5 AND C5C KAYE CORNER CHAIRS

(effective 2/24/03)

Estas são as instruções para usuários da Cadeira de Canto Kaye C5 e C5C. Todas as pessoas que montam ou ajustam o equipamento devem ler primeiramente todas estas instruções. Por favor, guardar estas instruções para futuras consultas.

USO

As cadeiras de canto Kaye são projetadas para crianças que necessitam de suporte de cabeça, tronco e pélvis para estabelecer uma postura reta quando sentada e alinhada com cabeça e tronco.

TAMANHOS E MODELOS

A C5 é a mais larga dos dois tamanhos da cadeira de canto. Com rodas castor opcionais, a cadeira C5 torna-se a C5C.

LIMITES DE TAMANHO E PESO

O número do modelo está localizado na etiqueta de atenção.

A C5(C) é apropriada para usuários de 4 até 8 anos, até 147 centímetros de altura, ou aqueles com peso até 29 quilos.

CONTEÚDO DA CAIXA

A C5(C) é montada, inspecionada e depois, parcialmente desmontada para envio. As seguintes peças devem conter na caixa

1. Um assento montado: três almofadas que estão anexadas com barras de metal
2. Um encosto montado: dois painéis de madeira articulados juntos; estes painéis possuem almofadas até no topo da borda.
3. Uma bandeja montada: uma bandeja com duas formas triangulares ligadas.
4. Uma base: plana, painel madeirado com 20 furos.

5. Uma sacola de ferragens contendo quatro dos seguintes itens: parafusos e e arruelas lisas grandes.

6. Caso você adquira a cadeira C5C, deverá também haver uma caixa com os seguintes itens: 4 rodas castor; 16 parafusos curtos; e 16 arruelas de travamento.

MONTAGEM DO ASSENTO

Refere-se ao diagrama anexado e a ligação do encosto com o assento como segue:

1. Identificar o encosto montado e girar o painel do encosto até que o vinil da almofada **fique facida com a outra**, e assim, os painéis formem um ângulo de 90°.

2. Identificar o assento montado. Remover o botão e arruela na ponta do lado direito do assento e o parafuso com cabeça do lado esquerdo.

3. Colocar o assento, vinil da almofada para cima, entre os dois lados. Quando fizer isso, direcionar o cinto ao redor da almofada do encosto, repousando na almofada do assento.

4. Guiar os dois parafusos que sobressaiam da borda do assento do lado direito pelos dois furos no lado direito do painel do encosto. Quando estiver fazendo isso, selecionar o conjunto de furos que encaixem o assento na altura desejada (Nota: eleva o descanso de cabeça a fim de posicionar o assento acima do quinto conjunto de furos).

5. Colocar a arruela e o "botão do assento" no parafuso frontal que devem agora projetar pelo lado direito, mas deixe o botão solto—apenas comece ele no parafuso. (O parafuso traseiro estabiliza o assento e não requer botão.)

6. Inserir o parafuso com cabeça através do furo correspondente no lado

esquerdo do painel do encosto e dentro do furo no final do assento. Apertar ou comprimir o painel do encosto esquerdo dentro do assento e apertar o parafuso com cabeça.

7. Apertar ou comprimir o painel do encosto direito dentro do assento e apertar o "botão do assento."

MONTAGEM DA BASE

Refere-se à figura e montagem anexa da cadeira, de cima, até a base como segue:

1. Deitar a base, com o lado com acabamento, no chão.
2. Colocar a lateral montada na base como mostrado. Alinhar os quatro furos verticais da beirada do painel do encosto com os quatro furos da base.
3. Colocar a arruela de trava larga e plana em cada parafusos. Inserir-los através dos quatro furos (a figura possui quatro pontos nomeados como "parafuso".).
4. Após o aperto inicial dos quatro parafusos serem feitos inicialmente, aperte-os firmemente.

COLOCAÇÃO DAS RODAS E USO

Colocar, travar e destravar as rodas acessórias como segue:

1. Colocar as arruelas de trava em cada um dos 16 parafusos.
2. Girar a cadeira de canto do seu lado para que você tenha acesso ao lado de baixo da base.
3. Alinhar os furos de cada placa da roda com os furos nos cantos da base.
4. Prender cada roda no local com quatro parafusos e arruelas, e apertar firmemente os parafusos.
5. Para travar as rodas para que elas não rolem, pisar no breque de metal que se sobressai em cada roda. Uma vez que o breque é acionado para baixo completamente, ele evitará a rolagem da roda.
6. Para destravar as rodas, acione o breque para cima.
7. As rodas devem ser travadas quando a cadeira não for ser movida intencionalmente.

AJUSTE DA ALMOFADA DE CABEÇA

Para ajustar a altura da almofada de cabeça que ajuda o usuário a manter a cabeça alinhada, proceda desta forma:

1. Identificar e soltar os dois botões atrás de cada encosto.
2. Re-posicionar a almofada de cabeça.
3. Re-apertar os botões.

INSTALAÇÃO DA BANDEJA

Instalação da bandeja montada como se segue:

1. De cada lado da bandeja há uma trava com um trinco arredondado. Para instalar a bandeja, girar o trinco para cima e depois, para fora até que o pino esteja na direção externa da bandeja.
2. Do lado de dentro da bandeja há pequenos blocos de madeira. Posicionar a bandeja montada de frente com a cadeira até que um conjunto destes blocos parem no trilho saliente do lado de fora no canto do assento.
3. Posicionar a bandeja mais para trás possível e girar cada uma das travas para dentro para que o trinco trave atrás da borda lateral da bandeja.
4. Girar cada trinco para dentro para travar no local.

AJUSTE NA ALTURA DA BANDEJA

Ajuste a altura da bandeja para suportar confortavelmente os braços do usuário e assim, melhorar o posicionamento do tronco.

Ajuste a altura da bandeja como segue:

1. Deslizar o trinco para cima e para fora para remover a bandeja montada.
2. Reposicionar a bandeja num diferente conjunto de blocos pequenos de madeira no trilho do assento.
3. Re-instalar a bandeja.

AJUSTE NA PROFUNDIDADE DA BANDEJA

Ajustar a distância entre a bandeja e a almofada do encosto como se segue:

1. Soltar, mas não remover os dois botões de cada lado na lateral da bandeja.
2. Deslizar a bandeja para dentro ou fora.
3. Re-apertar os quatros botões.

AJUSTE NA ALTURA DO ASSENTO

Ajuste da altura do assento para controlar a dobra do joelho do usuário. Para ajudar a manter a posição do quadril, ajustar o assento para que o joelho e quadril do usuário estejam ambos flexionados.

Ajustar a altura do assento como descrito:

1. Remover a bandeja.
2. Atrás de um dos lados da cadeira há um botão preto ao nível do assento. Do outro lado, há um parafuso com cabeça ao nível do assento. Remover o botão com a arruela e o parafuso com cabeça.
3. Existe um parafuso sobressalente de onde você removeu o botão. Remover o assento pelo lado puxando-o na direção, assim o parafuso puxa através do furo na lateral.
4. Mover o assento para cima ou para baixo.
5. Re-instalar o assento inserindo o parafuso acima mencionado e um atrás dentro do conjunto de furos na lateral.
6. Re-instalar a arruela e o botão no parafuso.
7. Alinhar o parafuso com cabeça na mesma altura do botão, inseri-lo no furo na lateral e depois, no furo da lateral do assento.
8. Apertar firmemente o parafuso de cabeça e o botão.

AJUSTE NA PROFUNDIDADE DO ABDUTOR

Ajuste na posição do abdutor para manter a perna do usuário separada e para ajudar no alinhamento da pélvis.

Ajustar a profundidade do abdutor como descrito:

1. Remover a bandeja e o assento.
2. Girar o assento de cabeça para baixo e usar uma chave Phillips para remover

- os dois parafusos e arruelas que seguram a barra do abdutor no assento.
3. Reposicionar o abdutor.
4. Re-instalar e apertar os dois parafusos e arruelas.
5. Re-instalar o assento e a bandeja.

REMOÇÃO DA ALMOFADA DO ENCOSTO

Usar a almofada do encosto quando a criança necessitar de suporte adicional ao longo da espinha para manter uma postura sentada. Remover a almofada do encosto caso não seja necessária.

Remover a almofada do encosto conforme descrito:

1. Remover a bandeja e o assento.
2. Girar o assento de cabeça para baixo e usar uma chave Phillips para remover os dois parafusos e arruelas que seguram o suporte da almofada do encosto no lugar.
3. Remover a almofada do encosto e re-instalar o assento e a bandeja.

USO DO CINTO

Posicionamento do cinto ao redor do quadril para manter uma postura da pélvis ou ao redor do tronco para manter uma postura da parte superior do corpo.

Ajustar o cinto como se segue:

1. Para soltar a fivela, apertar as abas simultaneamente de cima e de baixo da fivela.
2. Para prender a fivela, inserir a aba do macho na aba da fêmea até que elas se unam com um click. Após prender a fivela, sempre puxar o cinto para garantir que esteja preso com segurança.
3. Para apertar ou soltar a fivela, alongar ou encurtar a sobra do cinto puxando o material pela aba da fivela do macho. Não remover a aba do macho do cinto.

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Verificar a cadeira regularmente. Apertar as ferragens se necessário.

Caso a unidade necessite de assistência ou peças, contate a Kaye

Products, Inc. ou o distribuidor de quem foi adquirido a unidade.

Caso um problema seja verificado que possa causar impacto no funcionamento, imediatamente pare o uso e contate a Kaye Products, Inc.

Não exponha a cadeira à chuva ou contato com água.

Use um pano levemente úmido para limpar a cadeira, mas seque a umidade da madeira após a limpeza.

Evitar qualquer excesso na cadeira enquanto estiver usando, armazenando ou transportando-a.

GARANTIA LIMITADA

Caso tenha algum sinal de defeito dentro de dois anos da compra original, nós forneceremos a troca da peça para corrigir o defeito. Desgaste natural e corte não é coberto pela garantia.

Kaye Products, Inc. não fornece nenhuma outra garantia, expressa ou implícita e não garante que o produto seja específico para o propósito particular. O comprador, proprietário e usuário assumem todos os riscos pessoais e de propriedade em caso de qualquer incidente com o uso do equipamento.

PRECAUÇÕES

1. Não ajustar a cadeira enquanto estiver em uso.
2. Antes do uso, garantir que as ferragens estejam apertadas firmemente.
3. Não usar a cadeira caso esteja quebrada ou faltando peças.
4. Não exceder o limite de tamanho ou peso.
5. Não alterar a cadeira ou uso que não esteja descrito nestas instruções.
6. Não deixar o usuário desacompanhado.
7. Usar com uma supervisão qualificada.
8. Não ficar em pé na cadeira.
9. Mantenha as rodas travadas ao menos que tenha intenção de mover a cadeira.
10. Sempre usar o cinto.

DÚVIDAS?

Caso você tenha alguma questão, comentário ou necessidade, por favor entrar em contato com a Kaye Products, Inc.




Ou o representante autorizado para o Brasil: MAIS MOVIMENTO COM. E IMP. DE PRODUTOS P/ REABILITAÇÃO LTDA. RUA ERNESTO BRISTOTTI, 41 - CAMPINAS - SP, FONE (19) 3304-2500.

versão 2 deste manual do usuário.

C5 & C5C, 2/23/03, page 4

Importado e distribuído por: MAIS MOVIMENTO COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA REABILITAÇÃO LTDA. CNPJ 58.895.681/0001-83. Rua Ernesto Bristotti Nº 41 - Jardim Myriam - Campinas/SP. CEP: 13.098-408. AFE ANVISA nº 8.11.374-2. Resp. Técnico: Emmanuel Dias de Sousa Lopes CREFITO/SP 188523-F. Registro ANVISA nº 81137420002. Serviço de atendimento do consumidor SAC: (19) 3304-2500 / sac@maismovimento.com.br.

Lado Esquerdo

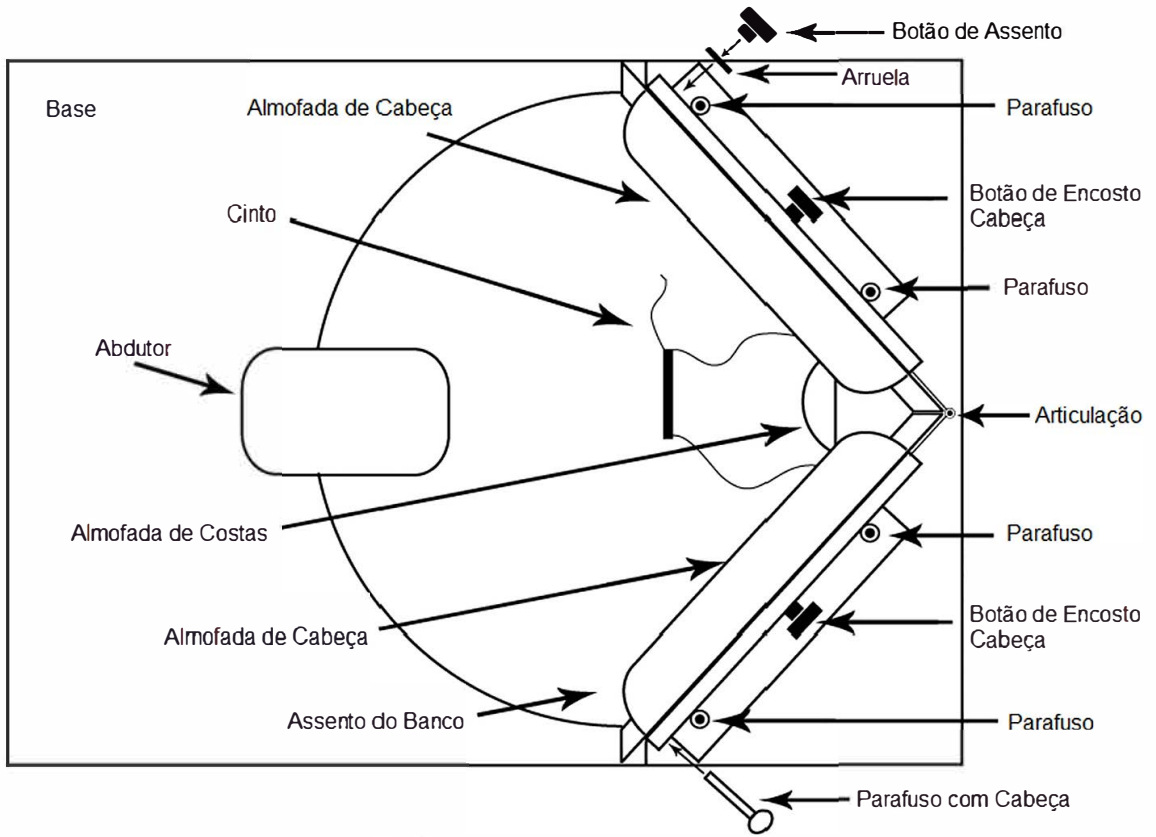

Lado Direito

